

In dieser Ausgabe

Seite Thema

- 1 ERS-Spirometriezelt in Glasgow**
- 2 Veranstaltungen & Kongresse**
- 2 EBM2000plus -Tipps zur Abrechnung**
- 2 Zitat des Monats**
- 2 EasyOne-PraxisTipp**

nnd EasyOne im Dauereinsatz beim ERS - Spirometriezelt in Glasgow, 04.- 05. September 2004

Im dritten Jahr in Folge, präsentierte der ERS - in Ko-operation mit Boehringer Ingelheim und nnd - zusammen mit der European Lung Foundation (ELF) eine 2-tägige Spirometrie-Test Veranstaltung in Glasgow.

Nach dem Motto, "Teste Deine Lungenfunktion -in nur 10 Minuten", zielte diese Aktion darauf ab, das öffentliche Interesse für Lungen-erkrankungen, speziell der COPD zu wecken.

Diese Initiative demonstriert die

ins Spirometriezelt auf dem "George Square" zu kommen, um dort ihre Lungenfunktion live zu testen.

nnd EasyOne - das Spirometer der Wahl

Das Spirometriezelt, ein großes (162 qm) Zelt, war mit 10 Einzelkabinen



eingerrichtet und jede ausgestattet mit einem nnd EasyOne für den Schnelltest, Diagnose und Dokumentation!

Ein Team von freiwilligen SpirometrieassistentInnen, MTA's und Ärzten hießen das Publikum von 10:00-17:00 Uhr an beiden Tagen willkommen.

Nach jedem Test wurde das ausgedruckte Ergebnis besprochen und den Teilnehmern ausgehändigt.

Allen Teilnehmern mit einer verminderten Lungenfunktion wurde ein formeller Empfehlungsbrief übergeben, um sich bei ihrem Hausarzt zur genaueren Abklärung vorzustellen.



Impressum

Redaktion: JE, RL
Gestaltung: Medit Verlag
Vertrieb: per PDF-Datei über e-mail
an Kunden bzw. auf Anfrage

Disklaimer:

Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Artikel aus Platzgründen zu kürzen. Der Inhalt wurde nach bestem Wissen und Gewissen geprüft, jedoch wird seitens der Redaktion keinerlei Verantwortung für die fachlich korrekten Aussagen übernommen.

nnd Medizintechnik AG
Technopark 1
CH-8005 Zürich / Schweiz
Tel. 0041-1-4452530
Fax. 0041-1-4452531
e-mail: info@nnd.ch

Verbundenheit des ERS für ein besseres Verständnis in der Öffentlichkeit über Lungenerkrankungen zu werben und dem Bedarf von Reihenuntersuchungen im Rahmen der Erstversorgung.

Am Samstag und Sonntag war die lokale Öffentlichkeit dazu eingeladen,



Die SpirometrieassistentInnen waren von der einfachen Handhabung des EasyOne begeistert


Und die Teilnehmer waren angenehm überrascht, wie unkompliziert es war, ihre Lungenfunktion testen zu lassen!

Tausend getestete Personen

Hochrangige Medienpräsenz im Fernsehen, begleitet von ausgiebiger Radio- und Presse-Berichterstattungen, zogen über 2000 Leute während des Wochenendes ins Zelt.

Die Reaktion des Publikums war sehr positiv. Die Besucher standen an beiden Tagen vor den eigentlichen Öffnungszeiten bereits Schlange. Die SpirometrieassistentInnen und MTAs konnten insgesamt ca. 1000 Personen testen. Bei den Testpersonen gab es einen breiten Altersunterschied.

Mehr als 11% der getesteten ehemaligen und derzeitigen Raucher wiesen eine verminderte Lungenfunktion

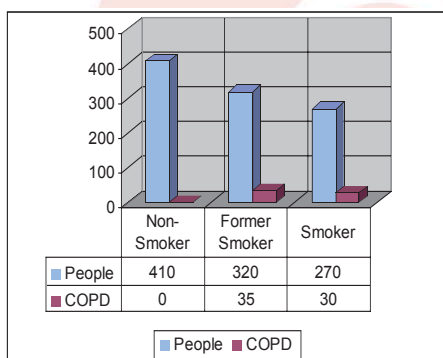

auf und erhielten den Rat, sich weitergehend untersuchen zu lassen.

Schulung der Öffentlichkeit

Erläuterungen und Diagramme auf Postern klärten über die Ursachen und Folgen von Lungenerkrankungen, speziell der COPD, auf.

Raucherentwöhnung war eines der meist diskutierten Themen mit den MTAs und ausgebildetes Fachpersonal stand bereit, um konkrete Ratschläge für weitere Maßnahmen mit auf den Weg zu geben.

Veranstaltungen & Kongresse

Oktober 2004

- BVJK inBadOrb
Kongress 11.-15.10.04
- Arbeitsmed. Herbsttagung Mainz
Kongress 22.-23.10.04
- PRAKTIKA -Bad Orb
Lufu-Kurse 28.-29.10.04

November 2004

Sie finden uns auf der

- MEDICA - Düsseldorf 24.-27.11.04
- Halle 11 Stand A22
- Halle 17 Stand B61
- Lufu-Kurs für Ärzte 27.11.04

EBM2000plus - Tipps zur Abrechnung

Mit dem neuen EBM2000plus (Einführung auf 1. April 2005) sind auch u.a. die Einführung sog. Kombiziffern geplant. D.h. z.B. bei der Abrechnung der fachinternistischer Basiskomplex-Ziffer 03210 müssen EKG, Spirometer und Blutdruck-Meßgerät vorgehalten werden, ob nun alle drei oder nur eine der besagten Messung durchgeführt wurde.

Die Spirometrie-Ziffer für die reine Aufzeichnung und grafisch/numerische Registrierung hat nun die Nummer 03330 und ist bewertet mit 165 Punkten.

Diese beiden Leistungsziffern werten die Bedeutung dieser Diagnose erheblich auf, was auch das wachsende Bewußtsein für das Thema Asthma und COPD in der hausärztlichen Praxis widerspiegelt.

Die entsprechende DMP-Asthma /COPD wird auf Anfang 2005 erwartet.

Mehr zu diesem Thema ggf. schon in unserer nächsten Ausgabe.

Zitat des Monats

Herr Dr. v.H aus L. berichtete uns begeistert nach Installation seines neuen EasyOnes-USB mit EasyWare:

„Endlich ein Spirometer, das so einfach zu bedienen ist wie ein EKG“...

PraxisTipp


EasyOne - manuelles Akzeptieren von Tests:

In der Werkseinstellung erfolgt die automatische Speicherung jedes Tests verbunden mit der Bewertung des Manövers.

Sie haben aber die Möglichkeit, die automatische Bewertung und Speicherung zu deaktivieren.


Dies macht ggf. dann Sinn, wenn Sie durch genügend eigene Erfahrung den Patienten für folgende Messungen selbst anleiten können und/oder Sie aus Erfahrung wissen, dass gerade die ersten Versuche Ihrer Probanden wegen Unerfahrenheit meist unakzeptabel sind.

Wechseln Sie dazu mit der Pfeiltaste im Hauptmenü auf den Punkt "Geräteeinstellungen" (Bild) - dann

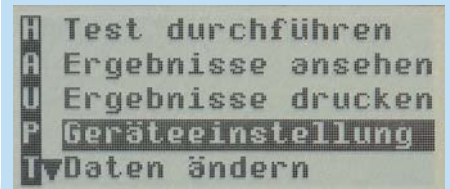

auf "Testeinstellungen"; in diesem Menü wechseln Sie mit der Pfeiltaste den Punkt - Autom. Qualität von "AN" auf "AUS".

Damit können Sie bei den folgenden Tests manuell wählen, ob sie diesen akzeptieren oder verwerfen (Bild).

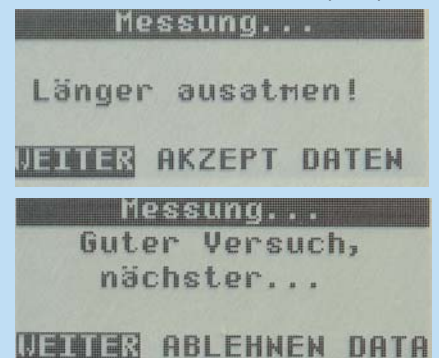

Falls Sie Ihren Mitbenutzern auch einen wertvollen Tipp aus Ihren praktischen Erfahrungen weitergeben wollen, schreiben Sie uns diese - am besten per e-mail: info@ndd.ch

EasyWare - Treiberproblem beim Installieren von EasyOne-Screen.

Beim Installieren der EasyWare muss darauf geachtet werden, daß der USB-Screen-Connector bzw. die USB-Basisstation nicht vor oder während der Installation angeschlossen ist, denn sonst versucht WINDOWS-Betriebssystem parallel einen anderen Treiber zu installieren, der dann später in Konflikt steht zu dem mitgelieferten USB-Treiber. Sollte dies bereits geschehen sein, muss der falsche WINDOWS USB-Treiber aus dem Menü Systemsteuerung /Hardwaretreiber entfernt werden (der Treiberkonflikt zeigt sich dort mit einem gelben Ausrufezeichen) Fragen Sie bei Systemproblemen ggf. Ihren Systembetreuer vor Ort oder die ndd-Hotline Tel. 0041-1-445 25 26 - Herr Künsch.

Beim nächsten Praxistipp besprechen wir die Druckeinstellung für die 1-Seiten-Darstellung bei Pre/Post-Tests - und - was bedeutet Auswahlkriterium: "bester Versuch" bzw. "bester Wert"?